

On·Call® Extra

Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος



- Αξιοπίστη αποτελεσματικότητα με κλινικά αποδεδειγμένη ακρίβεια
- Σύντομη δοκιμασία 4 δευτερολέπτων
- Μικρή σταγόνα αίματος 0.4 μL

VITREX SOFT

Σκαρφιστήρες



Σκαρφιστήρες των 30G συμβατοί με τις περισσότερες συσκευές τρυπήματος

Η κάθε συσκευασία περιέχει 50 τεμάχια

easydrip™ Pen Needles

Βελόνες ινσουλίνης



32G/4MM

31G/6MM

30G/8MM

- Αποστειρωμένες βελόνες τύπου πέννας με τεχνολογία λεπτού τοιχώματος
- Συμβατές με πέννες ινσουλίνης Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis

Η κάθε συσκευασία περιέχει 100 τεμάχια

On·Call® Extra

Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος



CE 0123

VITREX SOFT

Σκαρφιστήρες

CE 0197

easydrip™ Pen Needles

Βελόνες ινσουλίνης

CE 0197

WinMedica
Serving Health for Life

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35,
15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr

www.winmedica.gr



Diabetes 01_09/2021 5000

On·Call® Extra

Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος



- Extra ακρίβεια
- Extra έλεγχος



WinMedica
Serving Health for Life

Γιατί η αυτομέτρηση είναι σημαντική για τους διαβητικούς;

Η αυτομέτρηση της γλυκόζης στο αίμα επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης του αίματος, μειώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης διαβητικών επιπλοκών. Παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να ανιχνεύσουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα οποιαδήποτε στιγμή, βοηθώντας τους έτσι να εμποδίσουν τις άμεσες και πιθανά επικίνδυνες συνέπειες των πολύ υψηλών είτε πολύ χαμηλών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

Πόσο συχνά πρέπει να μετράτε το σάκχαρό σας (ενδεικτικά)


| Θεραπευτική επιλογή | Συχνότητα αυτομετρήσεων |
|--|--------------------------------------|
| Πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης ημερησίως ή αντλία ινσουλίνης | > 3-7 φορές/ημέρα |
| T2* ασθενείς με βασική ινσουλίνη άπαξ ημερησίως | 1 φορά ημερησίως το σάκχαρο νηστείας |
| T2 ασθενείς χωρίς ινσουλίνη | 3 φορές την εβδομάδα |
| Διαβήτης κύησης | 4-7 φορές την ημέρα |

* Ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη
Βιβλιογραφία: Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 2021


Φιλικό για τον χρήστη με πολλαπλές λειτουργίες

- Τεχνολογία βασισμένη στο ένζυμο GOD που έχει υψηλή εξειδίκευση χωρίς αλληλεπιδράσεις με ουσίες όπως η μαλτόζη, η γαλακτόζη κλπ.
- Ηχητική ανίχνευση πλήρωσης
- Δυνατότητα επανατοποθέτησης 2ης σταγόνας αίματος εντός 3 δευτερολέπτων για την εξοικονόμηση χρήσης ταινιών και αποφυγή σπατάλης
- Μεγάλη οθόνη με έντονα γράμματα για πιο εύκολη ανάγνωση
- Προγραμματισμός για υπενθύμιση έως και 5 δοκιμασιών ημερησίως
- Διακόπτης απελευθέρωσης επιτρέπει στον χρήστη να απορρίπτει χρησιμοποιημένες ταινίες χωρίς επαφή
- Αυτόματη διόρθωση ως προς τον αιματοκρίτη

Εύκολη δοκιμασία σε 2 βήματα για ταχύτητα και ακρίβεια

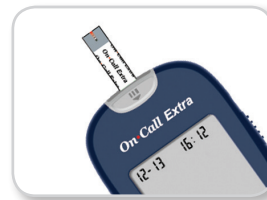

- 1 Εισάγετε μια δοκιμαστική ταινία ώστε να ενεργοποιηθεί ο μετρητής

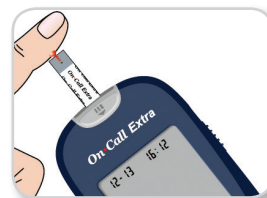

- 2 Τοποθετήστε μια μικρή σταγόνα αίματος και περιμένετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα εντός 4 δευτερολέπτων

Ακρίβεια Αποτελεσμάτων με Προηγμένες Δυνατότητες



Χωρίς κωδικοποίηση



Αξιόπιστα

Ακρίβεια αποτελεσμάτων συμβατά με το νέο ISO15197:2015



Εύκολα

Μικρή σταγόνα αίματος μόλις **0.4 μL**



Γρήγορα

Αποτέλεσμα σε μόλις **4 δευτερόλεπτα**

Έξυπνη και Ισχυρή Διαχείριση Δεδομένων



500 θέσεις μνήμης για καταγραφή αποτελεσμάτων με ακριβή ημερομηνία



Μέσος όρος αποτελεσμάτων 7,14,30,60 και 90 ημερών για κάθε είδους δοκιμασία



Εύκολη σύνδεση με υπολογιστή μέσω του ειδικού λογισμικού διαβήτη On Call επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων



Δείκτες για εμφάνιση υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας και κετονών

